

**1.Amaç:** Hastane ortamında kullanılan kritik olmayan malzemelerde uygulanması gereken orta düzey dezenfeksiyon işlemlerini kapsar.

**2.Kapsam:** : Bu tanım içerisine stetoskoplar, tansiyon aleti manşonu, termometre, kulak spekulumu gibi aletler girmektedir.

**3. Uygulama :**

3.1-TEMİZLEME: Malzemeler kullanım sonrası çeşme suyunun altında gerekirse fırçalanarak organik atıklardan arındırılmalıdır.

3.2-KURULAMA: Malzemeler dezenfektana atılmadan önce kurulanmalıdır.

**3.3-DEZENFEKSİYON:**

Hazırlanan uygun konsantrasyondaki orta düzey dezenfektan solüsyonun hazırlama tarihi ve hazırlayan kişinin adı dezenfektan kullanım defterine ve solüsyon kabı üzerine yazılmalıdır. Doz ayarlama tablosuna göre uygun konsantrasyonda solüsyon hazırlanmalıdır. Dezenfeksiyonu yapılacak malzeme tamamen solüsyon içerisine batırılarak tabloda belirtilen süre kadar bekletilmelidir.

**3.4- DURULAMA:**

Dezenfeksiyondan sonra kimyasal atıkların toksik etkisini önlemek için aletlerin yeterince durulanması gerekir.

**3.5-KURUTMA:**

Durulama işleminden sonra malzemeler temiz bir kompres ile kurulanmalıdır.

**3.6-SAKLAMA:**

Malzemeler yeniden kontaminasyonu engellenecek şekilde muhafaza edilmelidir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan